


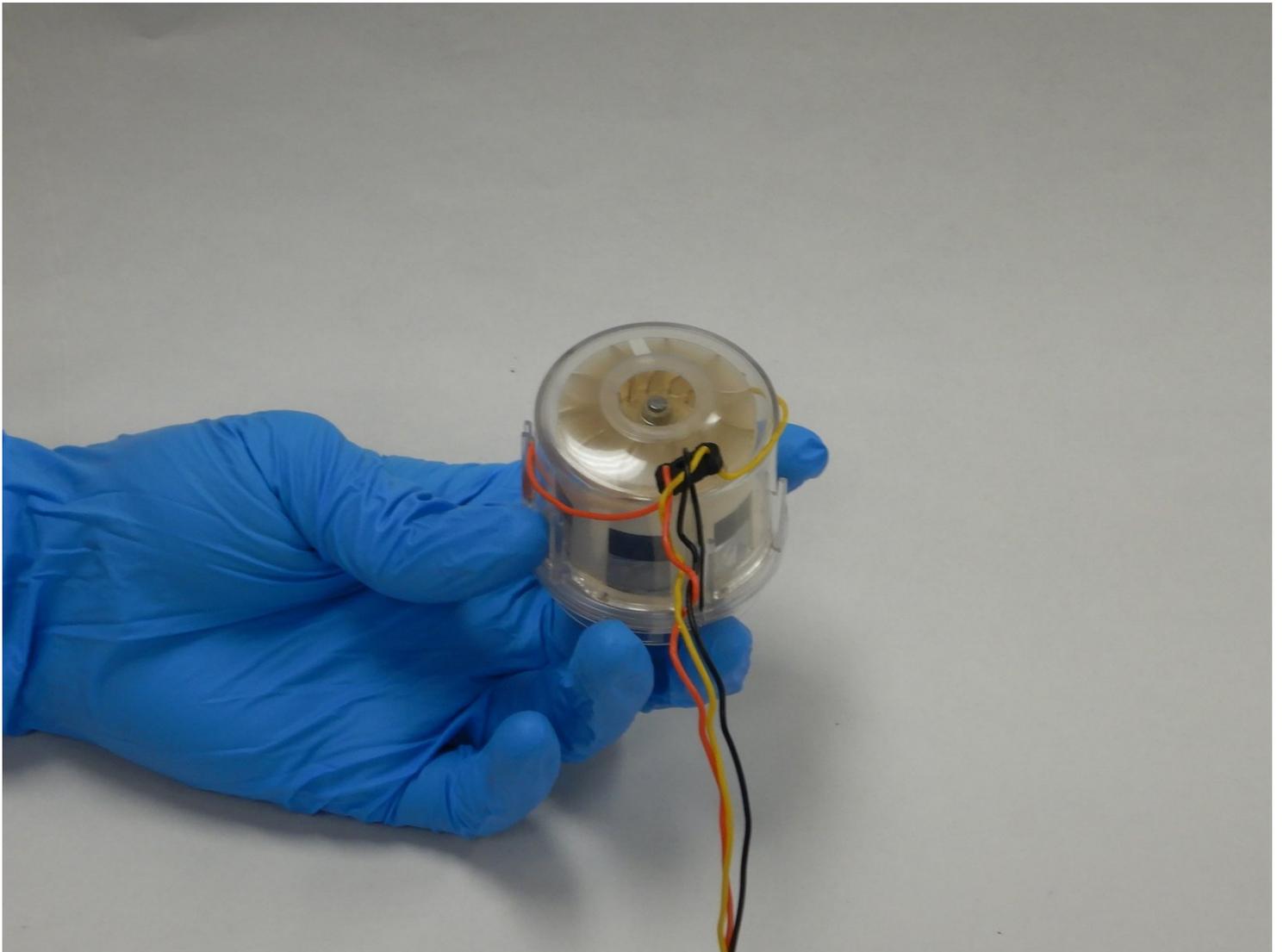

ResMod AirSense 10 Pumpenmotor-Austausch

Diese Anleitung beinhaltet einen kompletten...

Geschrieben von: Jacey Cobb



EINLEITUNG

Diese Anleitung beinhaltet einen kompletten Teardown, um an den Pumpenmotor zur Reinigung oder zum Austausch zu gelangen. Sollte das Gerät gebraucht gekauft worden sein, ermöglicht diese Anleitung dem Nutzer alle Teile des ResMed AirSense 10 zu überprüfen und zu reinigen.

WERKZEUGE:

TR10 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)

Spudger (1)

Schritt 1 — Pumpenmotor



- Positioniere den ResMed AirSense 10 so, dass der Wasserbehälter in deine Richtung zeigt.
- Fasse den Wasserbehälter sowohl oben als auch unten an, und ziehe ihn gerade heraus und weg vom Gerät.

Schritt 2



- Um die Vorderseite zu entfernen, positioniere den ResMed AirSense 10 so, dass der Bildschirm in deine Richtung zeigt.
- Platziere deinen Finger unter der Einkerbung unterhalb des Home-Buttons und ziehe die Vorderseite ab.
 - ⓘ Dies sollte nur mittleren Druck benötigen.

Schritt 3



- Entferne die zwei 14 mm Torx T10-Schrauben, die durch das Entfernen der Vorderseite aufgedeckt wurden.

Schritt 4




- Drehe das Gerät zur Unterseite des ResMed Airsense 10.
- Entferne die vier 10 mm Torx T10-Schrauben und lege die Schrauben sowie die Abdeckung der Plastikheizplatte zur Seite.
- Entferne die restlichen zwei 14 mm Torx T10-Schrauben.

Schritt 5



- Sobald du die Abdeckung der Heizplatte entfernt hast, trenne das orangene Kabel von der Sicherung.
- Ziehe das orangene Kabel vorsichtig durch die Silikondichtung.
- Entferne die Heizplatte komplett vom ResMed Airsense 10.

Schritt 6

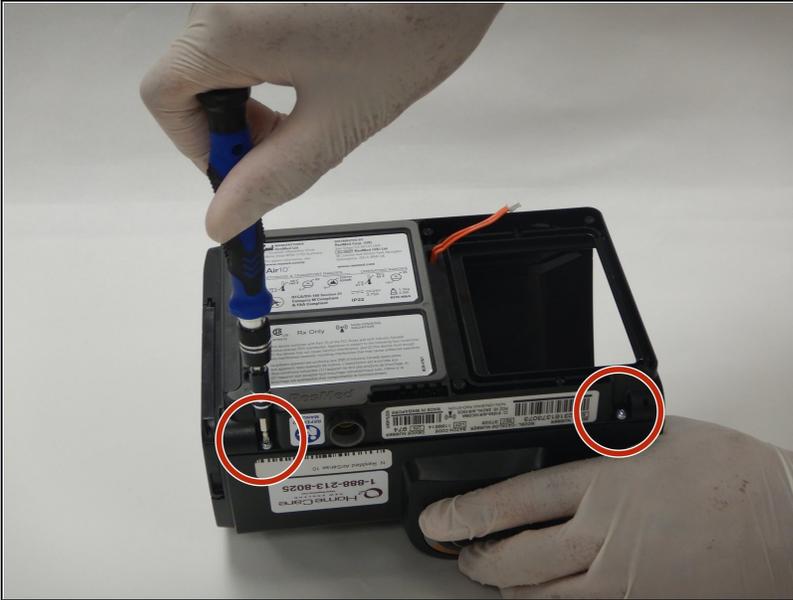



- Entferne die übrigen zwei 14 mm Torx T10-Schrauben, welche den Rahmen zusammenhalten.

Schritt 7




- Drehe den ResMed AirSense 10 so, dass die Rückseite der Maschine zu sehen ist. Der Luftausgang sollte in deine Richtung zeigen.
- Nutze den Plastikspudger, um das Gehäuse des ResMed AirSense 10 vom Gerät zu entfernen.
- Entferne das Gehäuse vom ResMed-Rahmen.

Schritt 8 — Modemkabel aus dem Anschluss lösen

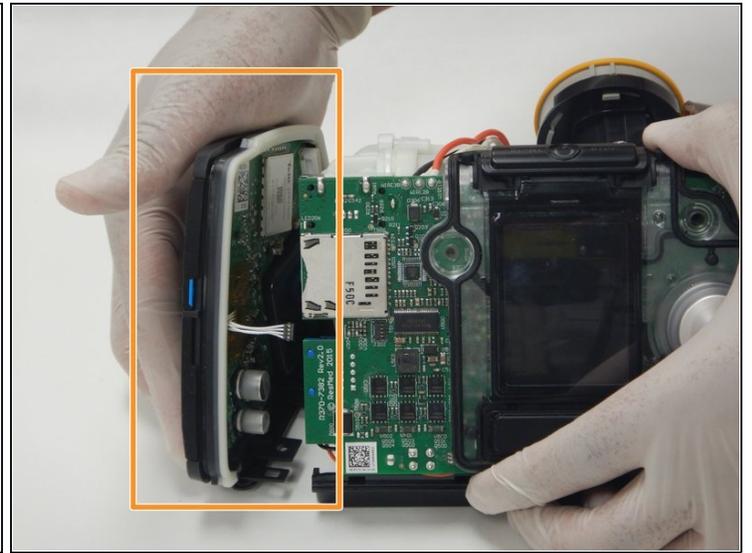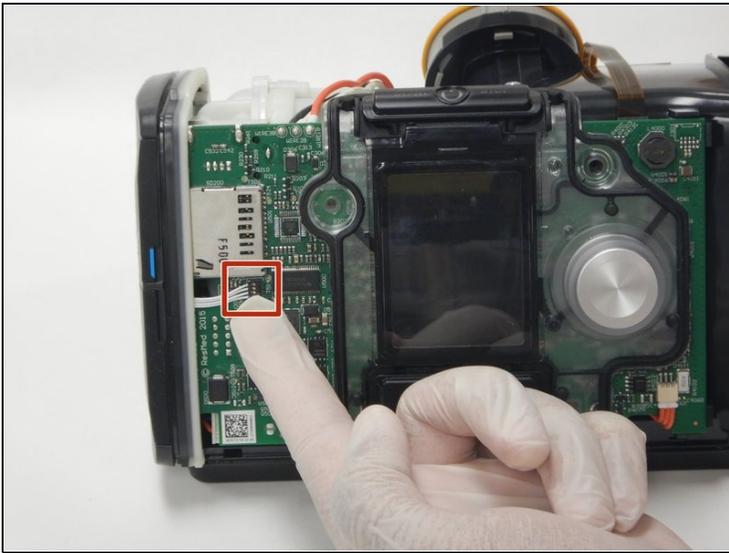


- Positioniere den ResMed AirSense 10 so, dass der Bildschirm zu dir zeigt.
- Entferne vorsichtig den 4-Pin Stecker, welcher sich links vom Bildschirm befindet.
- Entferne die linke Platte des ResMeds.

Schritt 9

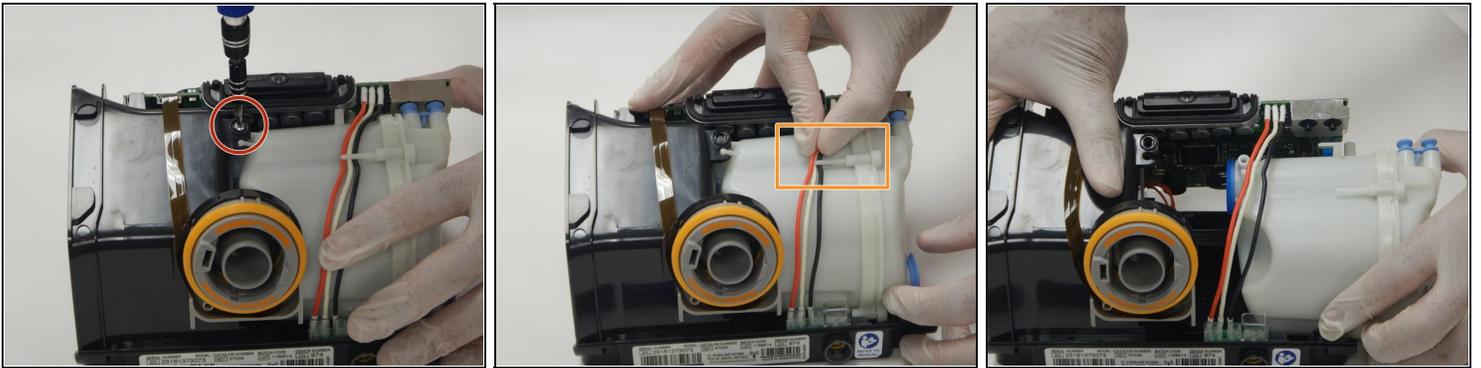


- Drehe den ResMed AirSense 10 so, dass der Luftausgang zu dir zeigt.
- Entferne die 14 mm Torx T10-Schraube, welche sich zwischen dem Luftausgang und dem vorderen Bildschirm befindet.
- Entferne die Kabel vom Haken des Pumpengehäuses.
- Entferne vorsichtig das Pumpengehäuse vom ResMed AirSense 10, bis die Steckverbindungen sichtbar sind.

Schritt 10

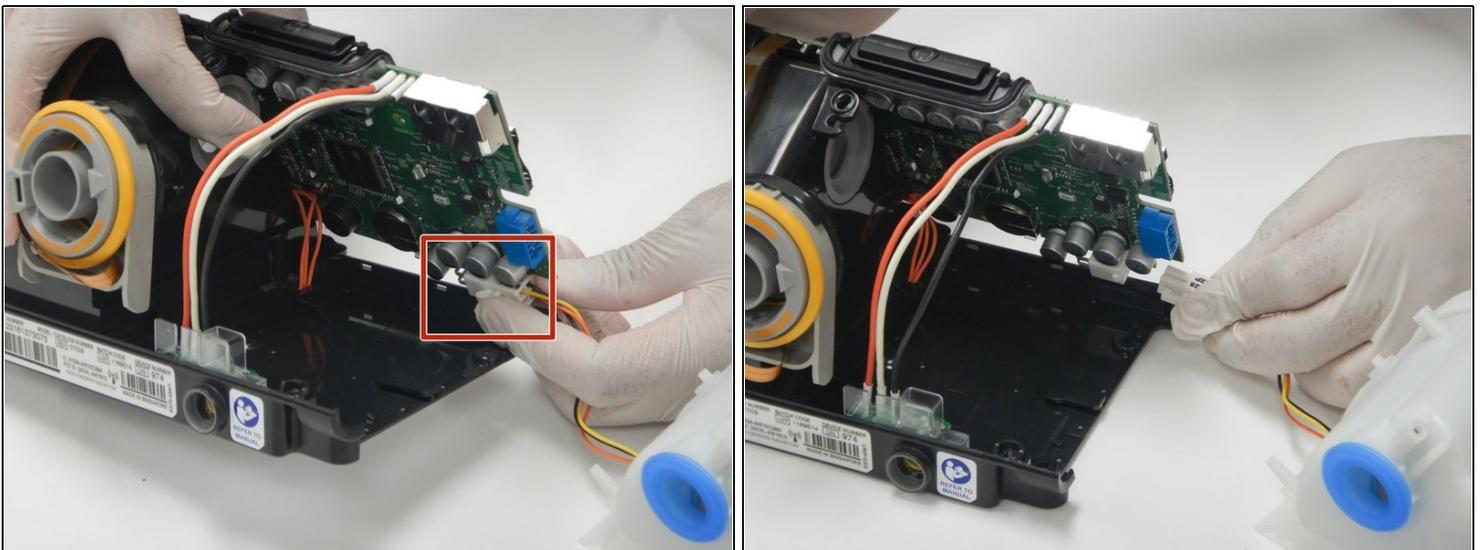


- Entklemme die Verbindung der Kabel, welche das Gehäuse der Pumpe mit dem Motherboard verbinden, um die Pumpe vollständig zu trennen.

Schritt 11

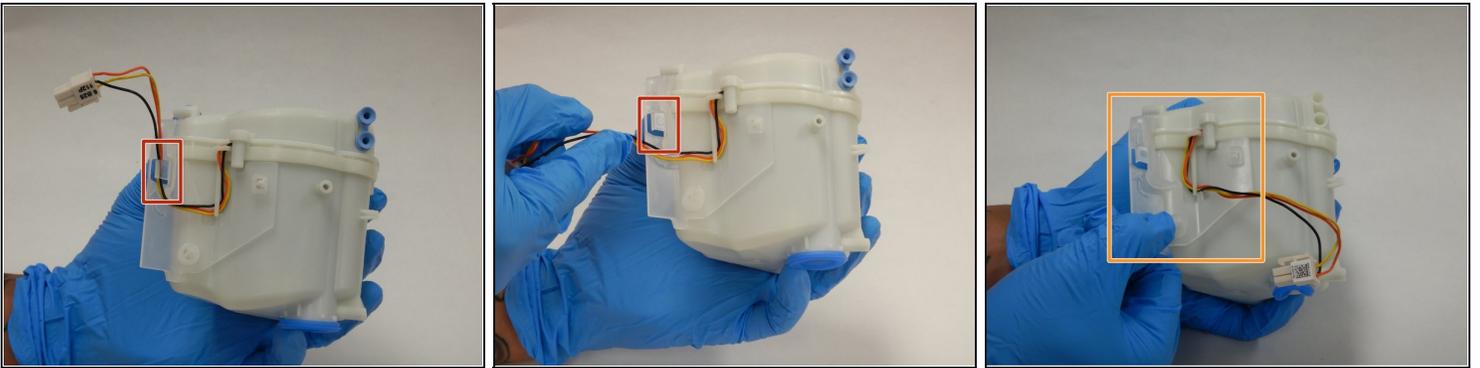


- Drehe das Gehäuse der Pumpe so, dass die Kabel in deine Richtung zeigen.
- Hake die Kabel aus der äußersten Klammer aus.
- Entferne dann den Plastikhalter vom Pumpengehäuse.

Schritt 12

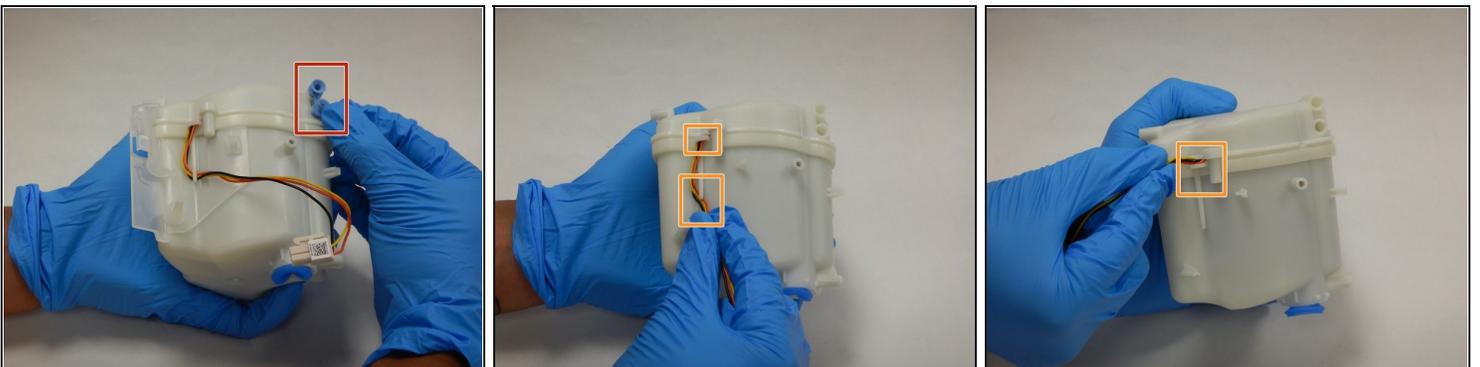


- Entferne den blauen Silikonpuffer an der rechten Ecke.
- Entferne die Kabel von den verbleibenden Haken.

Schritt 13

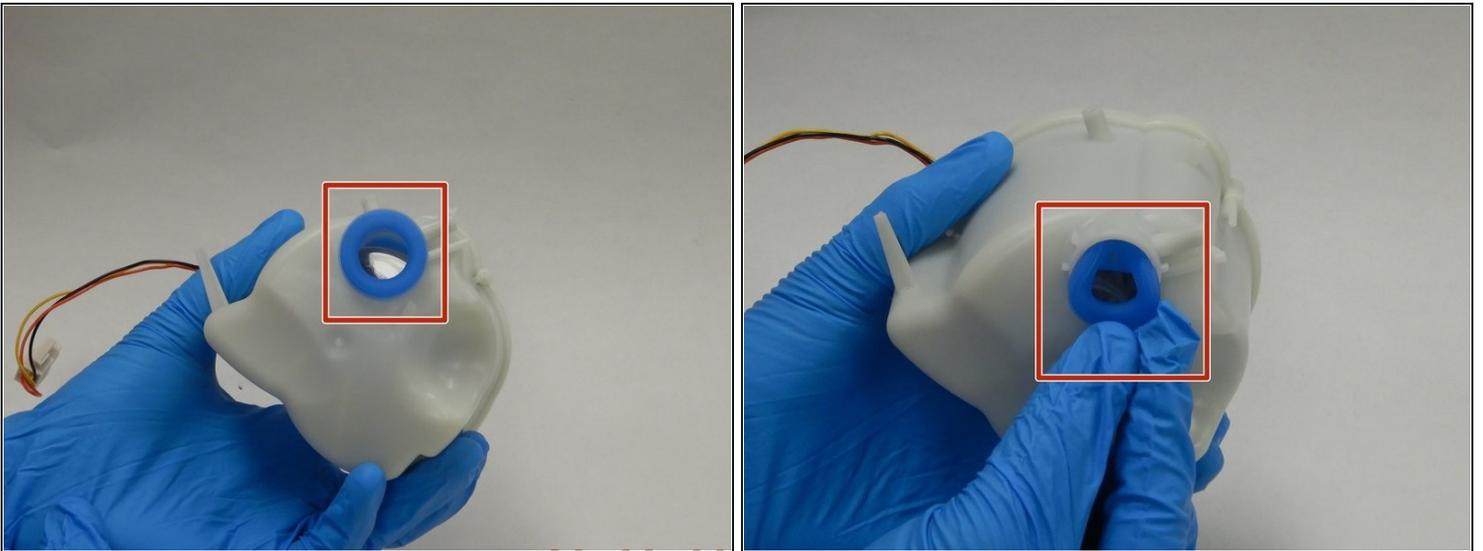




- Drehe die Pumpe so, dass du die Auslassöffnung siehst.
- Drücke die Auslassnoppe in das Pumpengehäuse.

Schritt 14

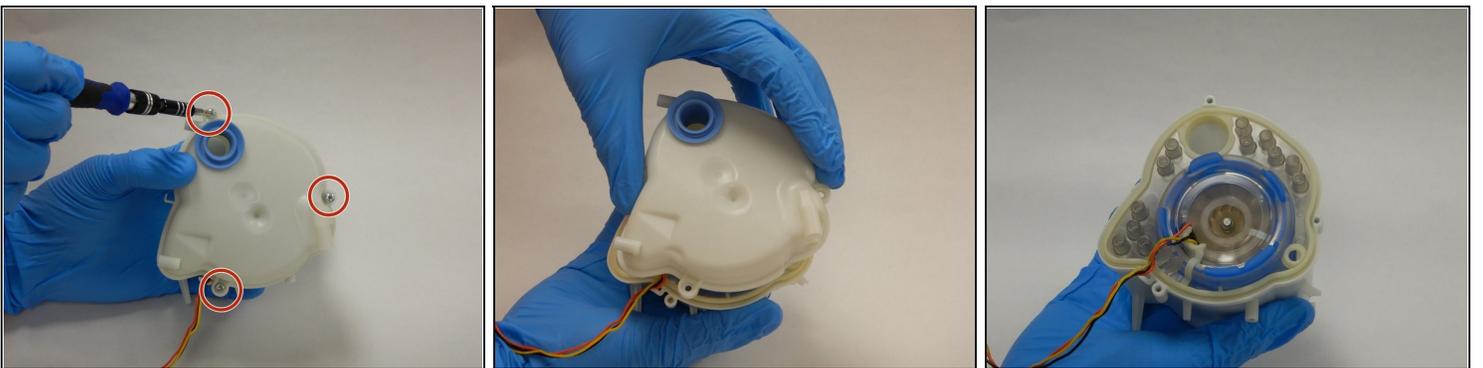


- Drehe die Pumpe in Richtung der drei Torx T10-Schrauben.
- Entferne die drei 14 mm Torx T10-Schrauben.
- Hebe das Oberteil des Pumpengehäuses ab.

Schritt 15

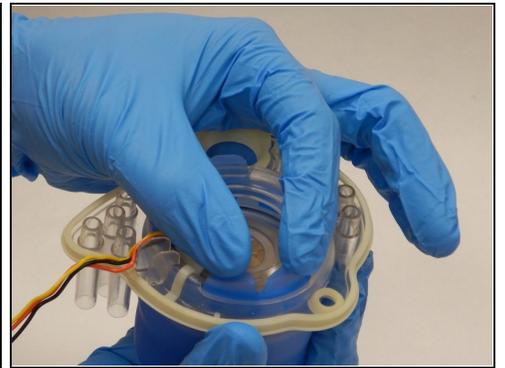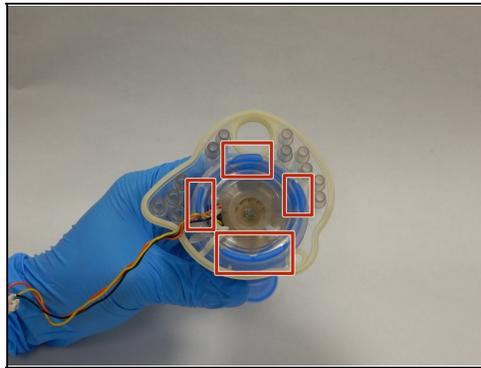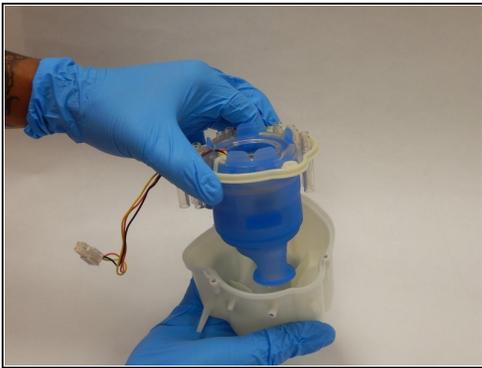


- Entferne den Pumpeneinheit vom Pumpengehäuse und drehe diese mit der Montageplatte in deine Richtung.
- ⓘ Die Montageplatte muss entfernt werden, um Zugriff auf die Pumpe zu haben.
- ⓘ Es gibt fünf Gummirippen, die die Montageplatte mit der Gummisocke verbinden, die die Pumpe umhüllt.
- Drücke die Rippen durch die Löcher in der Montageplatte.

Schritt 16

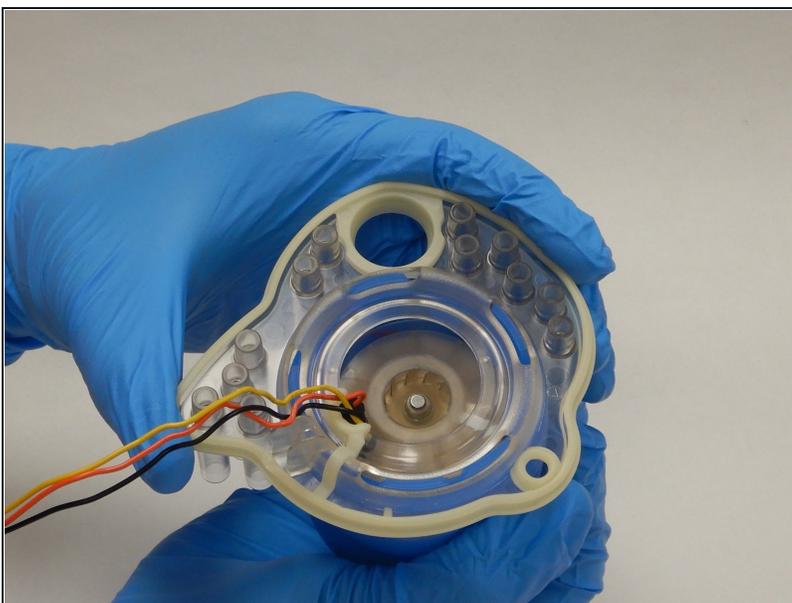

- Trenne die Montageplatte von der Gummisocke.

Schritt 17

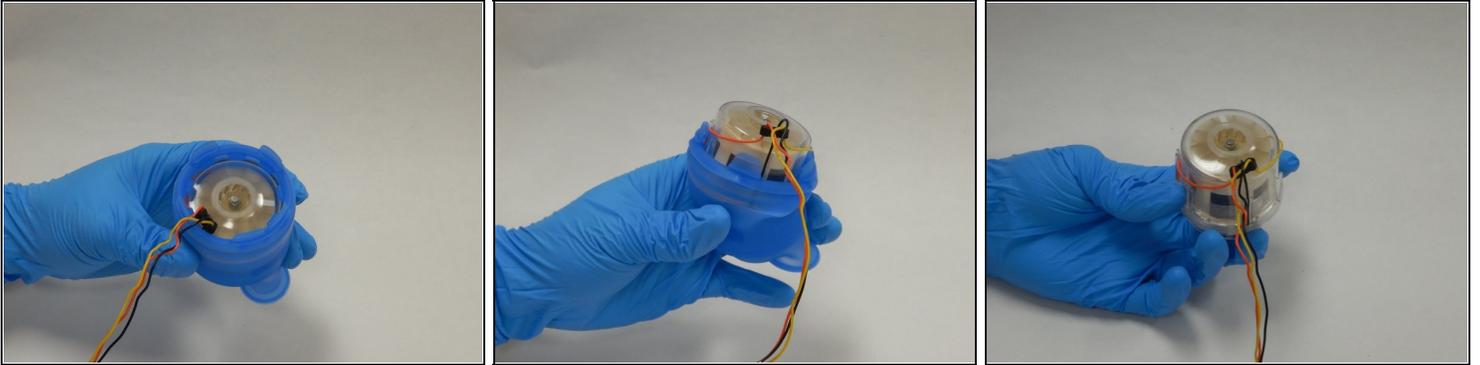

- Ziehe die Gummisocke ab, um die Pumpe aufzudecken.

⚠ Beschädige die Kabel beim Entfernen der Gummisocke nicht

i Die aufgedeckte Pumpe kann nun gereinigt und auf Schäden geprüft werden.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.